

歯科材料 5 歯科用接着充填材料  
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 31750002  
**オーソ ソロ**

再使用禁止 (ユニドーススティック、ブラシ、ウェル)

**【禁忌・禁止】**

- ・本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止 (ユニドーススティック、ブラシ、ウェル)

**【形状・構造及び原理等】**

性状: ペースト

容器: ボトル、ユニドース スティック

付属品: ディスポーザブル ウェル  
          ディスポーザブル ブラシ

成分: Bis-GMA、トドキシエチルメタクリレート、カンファネソ、シリカ、フィラー、その他

原理: 接着歯面の前処理材として、歯面にフィラー含有樹脂含浸層を形成し、接着材の接着力を促進する。

**【使用目的又は効果】**

歯列矯正用ブラケットの歯牙若しくは歯科修復物への合着又は接着に用いる。

**【使用方法等】**

1. 常法に従って、ダイレクトボンド用ブラケットあるいはチューブを接着しようとする歯面を清浄乾燥する。
2. 歯科用エッチング材を、歯面に塗布後 30 秒間放置して、脱灰する。
3. 歯科用エッチング材を水で完全に洗い流し、霜白色になるまで乾燥させる。
4. 1) ボトルタイプを使用する場合  
ミキシング ウェルにオーソ ソロを滴下し、付属のディスポーザブルブラシを用いて、ペーストを歯面に一層塗布する。  
2) ユニドース スティックを使用する場合  
赤いスティックを黒い容器に押し込み、スティックの先端にペーストを付ける。  
スティックを引き出し、歯面に一層塗布する。
5. 使用する接着材の使用説明書に従ってダイレクトボンド用ブラケット及びチューブを接着する。

**【使用方法に関連する使用上の注意】**

- ① ボトルタイプを使用する場合は、使用前によく振ること。
- ② ボトルのキャップは取ったままで放置せずに、使用後は直ちに締めること。
- ③ 接着手順の際に、エッチング処理を施した歯面が唾液等で汚染しないように注意すること。
- ④ エッチングしたエナメル質が均一に霜白に見えることを確認すること。

**【使用上の注意】**

**〔重要な基本的注意〕**

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ② 本材の使用により、発疹などの過敏症が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ③ 本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接触れないようにすること。また、本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ④ 本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合にはすぐに石鹼と水で洗浄すること。皮膚炎が起きた場合には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。
- ⑤ 未重合の本材(メタクリル酸系モノマー含有樹脂)は、接触皮膚炎を起こしたり、歯髄に損傷を与える可能性があるため皮膚、眼、軟組織に接触させないこと。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断をうけること。

**\* 【保存方法及び有効期間等】**

**〔貯蔵・保管方法〕**

- ・直射日光、デンタルライト等の強い光があたる場所、及び火気の近くには置かないこと。

**〔有効期間〕**

- ・36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6859-0065  
製造業者 : オームコ社 (Ormco Corporation)  
国名 : アメリカ (U.S.A.)