

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000
クリンパブル ボールフック


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状:

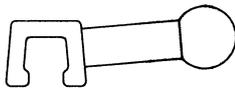

原材料: ステンレス鋼

Cr 16.0~18.0%, Ni 10.0~14.0%, Mo 2.0~3.0%,
その他 (C, Mn, P, S, Si, Cu) 5%以下, Fe 残余

【使用目的又は効果】

歯列矯正に用いる。

【使用方法等】

矯正用ワイヤーに取り付けて、エラスティック、モジュール、コイルスプリング等を掛ける。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6859-0065
製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)
国名 : アメリカ (U. S. A.)