

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用顔弓 40468000  
**エス アール フェイスボウ**

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

- ・本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

・SR フェイスボウ

形状:

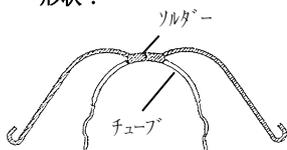


種類:

- ・ロング アウターボウ
- ・ショート アウターボウ
- ・ミニショート アウターボウ
- ・スーパーショート アウターボウ

・SRX フェイスボウ

形状:

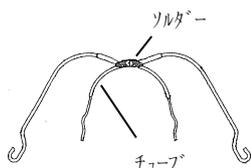

種類:

- ・ショート アウターボウ
- ・ミニショート アウターボウ

原材料: ステンレス鋼、銀ろう

ワイヤ: Cr 18.0~20.0%, Ni 8.0~12.0%,

その他(C, Mn, P, S, Si)5% 以下, Fe 残余

チューブ: Cr 17.0~19.0%, Ni 9.0~12.0%,

その他(C, Mn, P, S, Si, Ti)5% 以下, Fe 残余

ソルダール: Ag 55.0~57.0%, Co 21.0~23.0%, Zn 15.0~19.0%,

Tin 4.5~5.5%

・SR フェイスボウ

サイズ	インナーチ直径 mm (インチ)	ループ	製品コード			
			ロング アウターボウ	ショート アウターボウ	ミニショート アウターボウ	スーパーショート アウターボウ
1	1.12 (0.044)	ループ付 (オメガ・ ループ)	200-0201	200-0221	200-0241	—
			200-0202	200-0222	200-0242	200-0262
			200-0203	200-0223	200-0243	200-0263
			200-0204	200-0224	200-0244	200-0264
			200-0205	200-0225	200-0245	200-0265
SM		ループ無 (ブレーン)	—	200-0227	—	200-0267
LG			200-0208	200-0228	—	200-0268
2	1.27 (0.050)	ループ付 (オメガ・ ループ)	—	—	—	—
			—	—	200-0252	—
			—	—	200-0253	—
			—	—	200-0254	—
			—	—	200-0255	—

・SRX フェイスボウ

サイズ	インナーチ直径 mm (インチ)	ループ	製品コード	
			ショート アウターボウ	ミニショート アウターボウ
3	1.12 (0.044)	ループ付 (オメガ・ループ)	200-1223	200-1243
			200-1224	200-1244
LG		ループ無 (ブレーン)	200-1228	—

**【使用目的又は効果】**

ヘッドギアと組合せて歯列矯正に用いる。

**【使用方法等】**

1. 患者に適切なサイズのフェイスボウを選択し、形状を調整する。
2. インナーアーチを上顎に装着した歯列矯正用チューブに挿入する。
3. アウターボウをヘッドギアのネクストラップ等に装着する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 損傷を受ける恐れがあるので、安全開放装置なしで本製品を使用しないこと。
- 2) フェイスボウを取り外す際には、まずアウターボウを外してから、口腔内のインナーアーチをチューブから外すこと。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 患者の怪我、装置の損傷等を防ぐために、患者への使用方法の説明を詳細に行うこと。
- 3) 装置に異常があった場合、フェイスボウが装着しづらい場合は、使用を中止して、直ちに医師の診察を受けるように指示すること。

[不具合・有害事象]

有害事象  
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]

製造から5年間[自己認証(製造元データ)による]

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名: カボデンタルシステムズ株式会社

連絡先: 03-6859-0065

製造業者: オームコ社(Ormco Corporation)

国名: アメリカ(U.S.A.)