

機械器具 58 整形用機械器具  
 一般医療機器 歯列矯正用ヘッドギア 31757000  
**ブライトギア**

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**


本品は、サービカル ネック パド、ハイブル ストラップ、リリース モジュールで構成される。  
 リリース モジュールをサービカル ネック パドあるいはハイブル ストラップに取り付け使用する。リリース モジュールにはスプリングが内蔵され、この収縮反発力をフェイスボウの牽引力とする。

1. サービカル ネック パド  
 パドの色調により、6種類の製品がある。

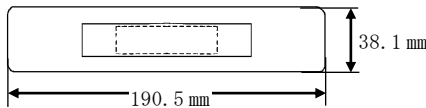

色	製品番号	色	製品番号
デニム	715-1001	ブルー	715-1004
ピンク	715-1002	グリーン	715-1005
イエロー	715-1003	ブラック	715-1006


2. ハイブル ストラップ  
 飾り布の色調により、3種類の製品がある。

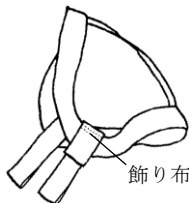

飾り布色	製品番号
ブラック	715-1011
ピンク	715-1012
イエロー	715-1013


3. リリース モジュール  
 ボディ、クラスプ、ストラップから構成され、形状の異なる2種類がある。内蔵されるスプリングは2種類(ミディアム、ヘビー)あり、ストラップの色で識別できる。  
 ストラップとクラスプの接点は、フェイスボウが過剰な力で引っ張られたとき、フェイスボウを装着したまま、自動的に離脱する。

レギュラー:

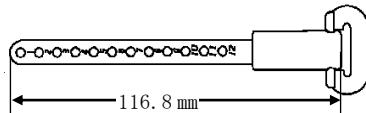

種類	ストラップ色	製品番号
ミディアム	ホワイト	715-1020
ヘビー	グレー	715-1021

Cタイプ:

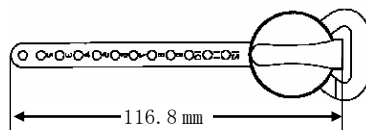

種類	ストラップ色	製品番号
ミディアム	ホワイト	715-2020
ヘビー	グレー	715-2021

原材料:



- ・リリース モジュール : ポリアセタール
- ・スプリング : ステンレス鋼
- ・サービカル ネック パド : ポリアミド (デニムのみ) : コットン
- ・ハイブル ストラップ : ポリアミド

**【使用目的又は効果】**


歯列矯正用顔弓(フェイスボウ)と併用して、口腔外から歯牙又は顎に圧力を加えるために用いる。

**【使用方法等】**

1. フェイスボウのインナーアーチをバックルチューブのスロットに差し込む。
2. リリース モジュールのボディからクラスプを取り外す。(Cタイプはそのまま引っ張れば外れるが、レギュラータイプは少しねじるとはずれやすい。)
3. 用途に合わせてサービカル ネック パド、又はハイブル ストラップを選択し、それぞれの通し口に外したクラスプを通し、再度ボディに取り付ける。

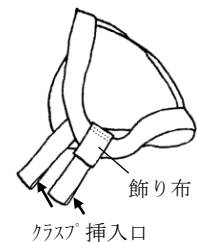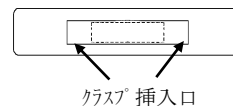

4. ブライトギアを装着する。  
 [サービカル ネック パドを使用する場合]  
 通し口が外側になるように、パドを患者の首の後ろの適切な位置に当てる。

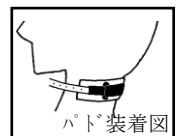

[ハイブル ストラップを使用する場合]  
 飾り布が外側になるように、ストラップを患者の頭部の適切な位置にかぶせる。



5. フェイスボウのフックをリリース モジュールのストラップに合わせて、全く牽引しないギリギリの穴の位置を確認する。
6. 上記の位置の穴より1つ奥の穴にフェイスボウのフックをかける。

【使用方法に関連する使用上の注意】

ケガ等の原因になることがあるので、リリース モジュールなしで本製品を使用しないこと。

**【使用上の注意】**

【重要な基本的注意】

本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

**【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
 連絡先 : 03-6859-0065  
 製造業者 : オームコ社(Ormco Corporation)  
 国名 : アメリカ (U.S.A.)