

機械器具 58 整形用機械器具  
管理医療機器 歯列矯正用弧線 41397000  
**TMA ワイヤー**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

**外形形状:**

- ・ストレート
- ・スタンダード アーチフォーム、上顎用/下顎用
- ・ブロード アーチフォーム、上顎用/下顎用(ラージ、スモール)
- ・リバースカーブ、上顎用/下顎用
- ・リバースカーブ Tループ付き
- ・オーソス アーチフォーム、上顎用/下顎用(ラージ、スモール)
- ・アレキサンダー アーチフォーム、上顎用、下顎用(ラージ、スモール)
- ・アレキサンダー ティアドロップループ アーチフォーム、上顎用/下顎用(ラージ、ミディアム、スモール)
- ・デイモン アーチフォーム
- ・リングル アーチフォーム
- ・バーストンリングル アーチフォーム、上顎用/下顎用  
STbストレートワイヤー アーチフォーム、(ラージ、ミディアム、スモール)

カラーワイヤー、ローフリクションワイヤー

- ・ブロード アーチフォーム、上顎用/下顎用(ラージ、スモール)
- ・デイモン アーチフォーム

**断面の形状:**

- ・円形(ラウンド)
- ・方形(レクタングュラー)

**原材料:** チタン・モリブデン合金

Mo 10.0~13.0%, Zr 4.5~7.5%, Sn 3.75~5.25%,  
その他(Fe, O, H, C, N<sub>2</sub>) 5%以下, Ti 残余

**原理:** 歯列矯正用アタッチメントに装着し、ワイヤーの応力により歯列に矯正力を付加する。

**種類:**

- ・ストレート 14インチ

サイズ	品番
.016	266-0001
.018	266-0002
.0175×.0175	266-0012
.016×.022	266-0010
.017×.025	266-0011
.019×.025	266-0013
.027	266-0006
.032	266-0004
.036	266-0005

- ・スタンダード アーチフォーム

サイズ	上顎	下顎
.016	202-0003	202-0005
.018	202-0004	202-0006
.0175×.0175	202-0012	202-0016
.016×.022	202-0011	202-0014
.017×.025	202-1007	202-1009
.019×.025	202-1008	202-1010
.021×.025	202-0013	202-0017

- ・ブロード アーチフォーム

サイズ	上顎		下顎	
	スモール	ラージ	スモール	ラージ
.016	210-0301	210-0311	211-0301	211-0311
.018	210-0302	210-0312	211-0302	211-0312
.0175×.0175	210-0401	210-0411	211-0401	211-0411
.016×.022	210-1402	210-1412	211-1402	211-1412
.017×.025	210-1403	210-1413	211-1403	211-1413
.019×.025	210-1404	210-1414	211-1404	211-1414
.021×.025	210-0405	210-0415	211-0405	211-0415

- ・ブロード アーチフォーム カラー

サイズ		カラー		
		スモール	ラージ	パープル
.016×.022	上顎	スモール	210-4402	210-5402
	上顎	ラージ	210-4412	210-5412
	下顎	スモール	211-4402	211-5402
	下顎	ラージ	211-4412	—
.017×.025	上顎	スモール	210-4403	210-5403
	上顎	ラージ	210-4413	210-5413
	下顎	スモール	211-4403	211-5403
	下顎	ラージ	211-4413	211-5413
.019×.025	上顎	スモール	210-4404	210-5404
	上顎	ラージ	210-4414	210-5414
	下顎	スモール	211-4404	211-5404
	下顎	ラージ	211-4414	211-5414

- ・リバースカーブ

サイズ	上顎	下顎
.016×.022	215-0003	216-0003
.017×.025	215-0004	216-0004
.019×.025	215-0005	216-0005

- ・リバースカーブ Tループ付き

サイズ ループ間距離	.016×.022	.017×.025	.019×.025
30mm	215-0021	215-0031	215-0041
32mm	215-0022	215-0032	215-0042
34mm	215-0023	215-0033	215-0043
36mm	215-0024	215-0034	215-0044
38mm	215-0025	215-0035	215-0045
40mm	215-0026	215-0036	215-0046

- ・オーソス アーチフォーム

サイズ	上顎		下顎	
	スモール	ラージ	スモール	ラージ
.016×.022	219-2208	219-2408	219-2108	219-2308
.017×.025	219-2210	219-2410	219-2110	219-2310
.019×.025	219-2212	219-2412	219-2112	219-2312
.021×.025	219-2213	219-2413	219-2113	219-2313

- ・アレキサンダー アーチフォーム

サイズ	上顎	下顎	
		スモール	ラージ
.016×.022	207-0045	207-0043	207-0044
.017×.025	207-0048	207-0046	207-0047
.019×.025	207-0063	207-0061	207-0062

・アレキサンダー ティアドロップループ アーチフォーム

サイズ ループ間距離	上顎	下顎
	.017×.025	.016×.022
34mm	206-0070	—
36mm	206-0071	207-0070
38mm	206-0072	207-0071
40mm	206-0073	207-0072
42mm	206-0074	207-0073
44mm	206-0075	207-0074
46mm	—	207-0075
キット	206-0076	207-0076

・デイモン アーチフォーム (ローフリクション)

サイズ	上/下顎
.016×.025	227-1111
.017×.025	227-1112
.019×.025	227-1113

・デイモン アーチフォーム (カラー)

サイズ	ハープル	ハコデュー
.016×.025	227-1141	227-1151
.017×.025	227-1142	227-1152
.019×.025	227-1143	227-1153

・リンガル アーチフォーム

サイズ	品番
.016	202-0025
.0175×.0175	202-0018
.017×.025	202-0020

・バーストンリンガル アーチフォーム

サイズ	上顎	下顎
.032	233-0002	233-0012
.032×.032	233-0001	233-0010

・STbストレートワイヤー アーチフォーム

サイズ	スモール	ミディアム	ラージ
.0175×.0175	204-2211	204-2212	204-2213

【使用目的又は効果】

歯列矯正用のワイヤーである。

【使用方法等】

1. 患者に適したブラケット及びチューブを装着する。
2. 歯列矯正する程度に合せワイヤーのサイズを選択する。
3. 必要に応じて、患者の歯列に合せワイヤーの形状を変形させる。
4. それぞれのブラケット及びチューブのスロットにワイヤーを通し、エラストックモジュールや金属結紮線で固定する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 装置作成及び調整時の曲げ伸ばし等による、疵や破断に注意すること。
- 2) ブラケットあるいはチューブに装着する際にはワイヤーの表面に疵を付けないために、ワイヤーに接する面が平らなインスツルメントを使用し、先端にギザギザの付いたインスツルメントを使用しないこと。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 2) 金属疲労等により破断することがあるので、装着後、ガムや硬いものを噛まないように患者に指示すること。また破断した場合は直ちに医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象  
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[耐用期間]

製造から5年間[自己認証（製造元データ）による]

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
 連絡先 : 03-6859-0065  
 製造業者 : オームコ社 (Ormco Corporation)  
 国名 : アメリカ (U. S. A.)