


機械器具(65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 70680000

ディスペンシングガン

【形状・構造及び原理等】

チップにユニドースタイプの歯科材料を装着し、レバーを握るとプランジャーが押されて歯科材料が押し出される。

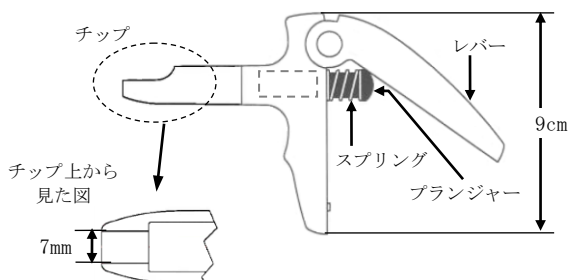

原材料

本体: ポリフェニルサルホン (PPSU)
プランジャー: アセタール樹脂 (POM)
スプリング: ステンレス鋼

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)
国名 : アメリカ (U. S. A.)

【使用目的又は効果】

歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる。

【使用方法等】

1. ユニドースタイプの歯科材料をディスペンシングガンの先端チップに装着する。
2. ユニドースのキャップを外す。
3. レバーを握って材料を注出する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) レバーはゆっくりと握り、一定の圧力で押し出すこと。
- 2) 材料を注出する時に、抵抗が感じられる場合は、過度の圧力をかけずに、ユニドースを装着し直すこと。
- 3) ユニドースは、一人の患者のみに使用し、再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 高圧蒸気滅菌 (132°C30分) を実施する。