



KaVo トリートメントユニット

プリムス 1058 Life クリーニングプログラムの概要

キー	名称	キー	名称
	集中水消毒 ON/OFF		ハイドロクリーン ON/OFF

クリーニングプログラム 01（ステップ 2 から開始）

バキューム・排唾管、スピットンボウルの水洗浄、インスツルメントホースを各 20 秒間洗浄します。

クリーニングプログラム 02（ステップ 4 から開始）

診療前に、ユニット内の滞留水を一旦排出します。

インスツルメントホースを各 2 分間洗浄、コップ給水の排出、スピットンボウルを水洗浄します。

ステップ	説明
4.0	給水 60 秒
3.0	コップ洗浄 20 秒
2.0	ハンドピースの洗浄 洗浄時間を個別に設定できます。 標準設定（推奨）： ▪ クリーニングプログラム 01：インスツルメント 1 本あたり 20 秒 ▪ クリーニングプログラム 02：インスツルメント 1 本あたり 2 分
1.0	3F シリンジおよび MF シリンジの洗浄 クリーニングプログラム 01 または 02 の洗浄時間を設定します。
0.1	ハンドピースをセットします。

クリーニングプログラムを即時に実施する場合は、選択したプログラムが開始します。

翌朝（前日にユニットの電源を OFF）に実施する場合は、自動的に開始され、プログラム 02 の洗浄時間が適用されます。

集中水消毒（オプション機能）

少し濃度の高いオキシゲナル 6 を水路管に充填、ホース内部に 30 分間、滞留させます。

ユニットの不使用期間が長期（4 週間以上）にわたる場合や高リスクの患者治療後は、集中水消毒プログラムを実施します。