



## KaVo トリートメントユニット

### エステチカ E50 Life クリーニングプログラムの概要

キー	キー名称	キー	キー名称
	集中水消毒 ON/OFF		ハイドロクリーン ON/OFF

#### クリーニングプログラム 01 (ステップ 2 から開始)

バキューム・排唾管、スピットンボウルの水洗浄、インスツルメントホースを各 20 秒間洗浄します。

#### クリーニングプログラム 02 (ステップ 4 から開始)

診療前に、ユニット内の滞留水を一旦排出します。

インスツルメントホースを各 2 分間洗浄、コップ給水の排出、スピットンボウルを水洗浄します。

ステップ	説明
4.0	給水 60 秒
3.0	コップ洗浄 20 秒
2.0	ハンドピースの洗浄 洗浄時間を個別に設定できます。 標準設定 (推奨): <ul style="list-style-type: none"><li>■ クリーニングプログラム 01: インスツルメント 1 本あたり 20 秒</li><li>■ クリーニングプログラム 02: インスツルメント 1 本あたり 2 分</li></ul>
1.0	3F シリンジおよび MF シリンジの洗浄 クリーニングプログラム 01 または 02 の洗浄時間を設定します。
0.1	ハンドピースをセットします。

クリーニングプログラムを即時に実施する場合は、選択したプログラムが開始します。

翌朝 (前日にユニットの電源を OFF) に実施する場合は、自動的に開始され、プログラム 02 の洗浄時間が適用されます。

#### ハイドロクリーン (オプション機能 ビルトイン・デカセプトルゲルキットを用いた場合)

1 日の診療後に、デカセプトルゲルを使用し、バキューム・排唾ホース、スピットンボウルを洗浄します。

#### 集中水消毒 (オプション機能)

少し濃度の高いオキシゲナル 6 を水路管に充填、ホース内部に 30 分間、滞留させます。

ハイドロクリーンを含みます。

ユニットの不使用期間が長期 (4 週間以上) にわたる場合や高リスクの患者治療後は、集中水消毒プログラムを実施します。