

KaVo トリートメントユニット

エステチカ E70/E80 Vision クリーニングプログラムの概要



① 患者ごと(リンス)

ユニット内部・外部の排水系のハイドロクリーン、スピットンボウルの水洗浄、インスツルメントホースを各 20 秒間洗浄します。

② 1日の診療前(フラッシング)

診療前に、ユニット内の滞留水を一旦排出します。

インスツルメントホースを各 2 分間洗浄、コップ給水、バキューム・排唾管、スピットンボウルを水洗浄します。

③ 1日の診療後(ハイドロクリーン)

診療後に、バキューム・排唾管のハイドロクリーン、スピットンボウルのデカセプトルゲルを使用した洗浄を行います。

インスツルメントホースも各 20 秒間洗浄します。

(推奨) 外科的処置後に、ハイドロクリーンを実行してください。

④ 週ごと(集中水消毒)

少し濃度の高いオキシゲナル 6 を水路管に充填、ホース内部に 30 分間、滞留させます。

ハイドロクリーンを含みます。

ユニットの不使用期間が長期(4 週間以上)にわたる場合や高リスクの患者治療後は、「週ごと(集中水消毒)」のクリーニングプログラムを実施します。