

機械器具(68) 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ 35860000

フリーフロー シリンジ


再使用禁止 (オペーク チップ)

【禁忌・禁止】

- オペーク チップは再使用禁止

- 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

*【形状・構造および原理等】

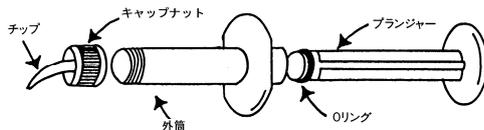

構成品	原材料	
外筒	アセタール樹脂	
プランジャー	アセタール樹脂	
キャップナット	アセタール樹脂	
チップ	レギュラー	ポリエチレン テレフタレート グリコール
	オペーク	ポリエチレン
Oリング	アクリルゴム	

付属品: 洗浄用ブラシ

【使用目的又は効果】

歯科用印象材料を口腔内又は印象用トレーに注入するために用いる。

【使用方法等】

- キャップナットに、チップを挿入する。
- 外筒にキャップナットを装着する。
- 練和した印象材をシリンジに充填し、プランジャーをシリンジに装着する。
- プランジャーを押して印象材を注出する。

*【使用方法に関連する使用上の注意】

- 印象材が漏れないように、キャップナットを確実に外筒に装着すること。
- プランジャーの作動が滑らかでない場合は、Oリングに白色ワセリン等の潤滑材を薄く塗布すること。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 初回使用前、及び各使用後直ちに【保守・点検に係る事項】に従い洗浄、滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 滅菌後、滅菌バッグに入れたまま、乾燥した環境で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

- 使用前・使用後の点検
損傷、変形等の異常がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 洗浄
 - 各構成品を分解する。
 - 食器用洗剤等の研磨材を含まない中性洗剤と温水を用い、目で確認できる汚れを付属の洗浄用ブラシで除去する。
 - 流水で30秒以上すすぐ。
 - 確認し、汚れが残っていれば、2)～3)を繰り返す。
 - 自然乾燥または清潔なクロスで水分を完全に拭きとる。
- 滅菌(キャップナット、外筒、プランジャーのみ)
 - 乾燥後、構成品を滅菌バッグに入れる。
 - 高圧蒸気滅菌を実施する。推奨される滅菌条件は以下のとおり。

方式	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
ブレバキューム式	135℃	3分	16分
重力置換式	132℃	15分	30分

[保守・点検に関する注意事項]

- 洗浄には、できるだけ精製水を使用すること。滅菌には蒸留水を使用すること。
- 器具洗浄器による洗浄は推奨しない。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)
国名 : アメリカ (U.S.A)