

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科印象用ワックス 34807000

オクルーザルインディケーターワックス


【禁忌・禁止】

本材あるいは類似の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：シート（1シート6片）

厚さ：0.38 mm（片面粘着面）

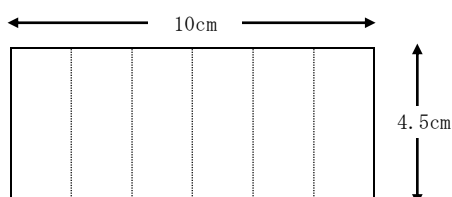

接着ノリで人工歯や歯牙にしっかりと接着する。咬合時、コンタクトの強い部分のワックスが薄く透けることで患者の咬合状態を知ることができる。

原材料：ミツロウ、パラフィンワックス、マイクロクリスタルワックス、その他

【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

【使用方法等】

- 1) 接着面を歯面に向けて頬側及び舌側の咬合面全体に被せるように配置する。
- 2) 患者に舌でワックスを湿らせるように指示する。
- 3) 患者に望ましい位置でかみ合わせる。
- 4) 薄く透けている部分を付属の鉛筆でマーキングする。
- 5) ワックスを取り出し、鉛筆でマーキングした部分を削る。
- 6) 外傷性咬合のインレー及び修復物の調整時には、隣在歯の調整も同様に行う必要がある。

[使用方法に関連する使用上の注意]

粘着面は光沢がある面なので、確認して使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・ 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所などに放置しないこと。
- ・ 25℃以下の場所で保管すること。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

- ・ 36ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社

連絡先：03-6866-7272

製造業者：スポファデンタル（SpofaDental a.s.）

国名：チェコ共和国（Czech Republic）