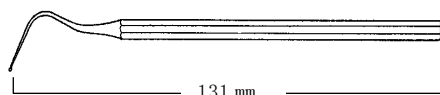


機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用充填器 70680000  
**ライフ用アプリケーション**

**【禁忌・禁止】**

ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理】**

原材料：ステンレス鋼

**【使用目的又は効果】**

本品は、歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジンセメント、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するために等に用いる。

**【使用方法等】**

ペーストを先端に付け窩洞に塗布する。

**【使用上の注意】**

- 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守点検に係る事項参照）を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- 洗浄・消毒・滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

**【保守・点検に係る事項】**

- 使用前・使用後の点検  
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 洗浄・消毒・滅菌
  - 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて速やかに洗浄する。
  - 高圧蒸気滅菌あるいは煮沸滅菌を行う。

**【保守・点検に関する注意事項】**

- 洗浄・消毒・滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先：03-6866-7272  
製造業者：カー社(Kerr Corporation)  
国名：アメリカ(U.S.A.)