


機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成へら 38530000

## ライフ用スパチュラ

### 【形状・構造及び原理等】

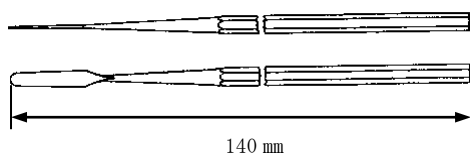

原材料：ステンレス鋼

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先：03-6866-7272  
製造業者：カー社 (Kerr Corporation)  
国名：アメリカ (U. S. A.)

### 【使用目的又は効果】

ペーストを練和するために用いる。

### 【使用方法等】

ペーストを先端で練和する。

### 【使用上の注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守点検に係わる事項参照）を行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検  
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 洗浄・消毒・滅菌
  - 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて速やかに洗浄する。
  - 高圧蒸気滅菌あるいは煮沸滅菌を行う。

#### 【保守・点検に関する注意事項】

- 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。