

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科レジン用接着材料 70816000
シランプライマー

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

性状;液体
容器;ボトル
成分;エタール、Bis-GMA、トリフェングリコールメクリート、その他
原理;接着面の表面に作用し、接着材と修復材の接着効果を高める。

【使用目的又は効果】

レジン系修復物又はレジン系矯正用ブラケットの接着に用いる。

【使用方法等】

1. 補綴物の被着面をアルミナでサンドブラストする。(圧力はコンポジットレジン 0.1MPa、セラミック及びポーセレンは 0.2MPa)
2. エッチング処理を行い、水洗後エアーを吹き付け乾燥する。
3. シランプライマーを塗布し、軽くエアーを拭きつけ薄く延ばし、乾燥する。
4. 使用する接着材の使用方法に従って接着を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材は可燃性であるので、火気の近くで使用したり、使用の際、火傷をしないように注意すること。また、適切な換気(1時間当たり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- 2) 揮発成分が入っているので、キャップを取ったまま放置せずに、使用後は直ちにキャップを確実に締めること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本材又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接触れないようにすること。また、本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 本材は、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。皮膚に付着した場合には、すぐアルコール綿等で拭いたあと、流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

***【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて保管すること。
- ・本材は可燃性であるので、火気の近くに保管しないこと。

[有効期間]

- ・36ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]
使用期限は、包装に記載。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー社(Kerr Corporation)
国名 : アメリカ (U.S.A.)