

あなたのラボワークに合わせて自由に選べる組み合わせ

ハイパワーと高精度のバランスをもつ2種類のグリップと、3種類のコントローラーを自由自在に組み合わせることができます。

グリップ (全2種)

エルゴグリップ



パワーグリップ



コントローラー (全3種)

Kコントロール

膝タイプ



卓上タイプ



1.005.4206	Kエルゴグリップ/KコントロールTLC 膝タイプ
1.007.2082	K/パワーグリップ/KコントロールTLC 膝タイプ

1.005.4204	Kエルゴグリップ/KコントロールTLC 卓上タイプ
1.007.2083	K/パワーグリップ/KコントロールTLC 卓上タイプ

フットタイプ



1.005.4207	Kエルゴグリップ/KコントロールTLC フットタイプ
1.007.2084	K/パワーグリップ/KコントロールTLC フットタイプ

エルゴグリップ/KコントロールTLC 届出番号:27B1X00149000048
 パワーグリップ/KコントロールTLC 届出番号:27B1X00149000050



iF product design award

iFデザイン賞は、ドイツのiF International Forum Design GmbHによって運営され、50年以上の歴史を誇る、世界で最も伝統あるデザイン賞の一つです。

お問い合わせディーラー名




カボ デンタル システムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>
 VHALMI1904V3 HT-021

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
 ※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

KaVo 技工用 ハンドピースシステム

人間工学により生まれたグリップのフィット感から得られる安心と信頼

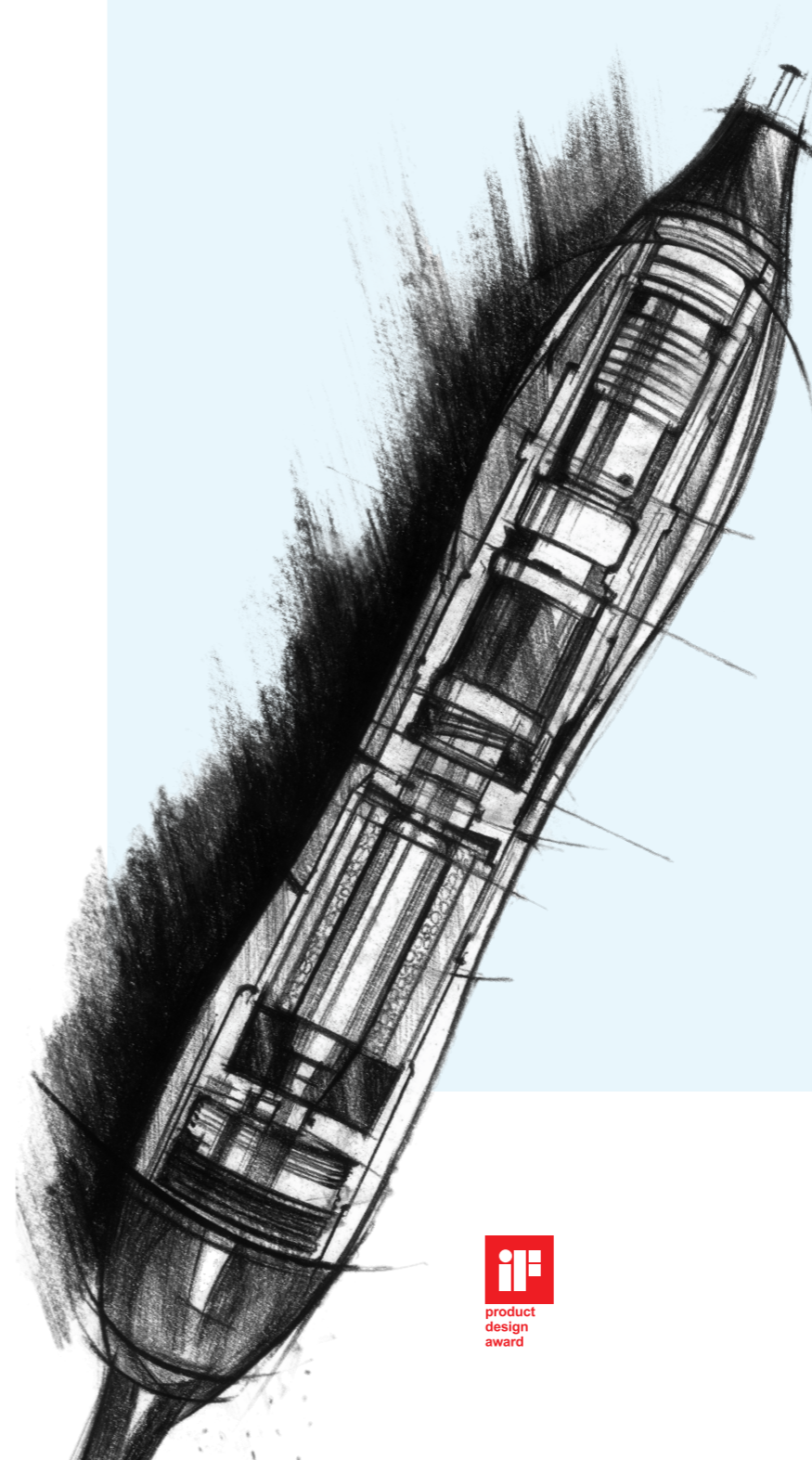

ハイパワーと高精度のバランス

カボラボエンジンハンドピースは、しっかりと手になじみストレスを感じさせない技工作業が行えます。振動が少ないブラシレスDCモーターの搭載によって、最高回転速度が50,000rpm、最大トルク7.0Ncmを実現しました。重さと形状の良好なバランスにより、あらゆる歯科材料を高精度で切削することができます。

エルゴグリップ

人間工学「エルゴノミクス」から名を受けた「エルゴグリップ」。



技術仕様	
最大トルク	7.0Ncm
回転速度範囲	1,000~50,000rpm 両方向
電力	160W
長さ	140mm
重量	202g
モーター駆動方式	ブラシレスDCモーター OSS (ワン・シャフト・システム)
チャック交換	ワンタッチノーツールシステム

パワーグリップ

カボの伝統的なフォームを継承した「パワーグリップ」。



技術仕様	
最大トルク	7.0Ncm
回転速度範囲	1,000~50,000rpm 5,000rpmまで逆回転
電力	160W
長さ	165mm
重量	250g
モーター駆動方式	ブラシレスDCモーター
チャックシステム	ワンクリックシステム

2種類のグリップシェル



エルゴグリップハンドピースは、グリップタイプに合わせて2種類のグリップシェルをご用意いたしました。



チャックが取り外し可能なので簡単に掃除ができます。女性の方や手の小さな方でも、フィットして持ちやすく設計されています。

デジタルコントローラーとユニバーサルコントローラー

カボラボエンジンコントロールは、回転速度をデジタルで制御されており、指先でご希望の速度とトルクの組み合わせを正確に設定できます。KコントロールTLCシリーズは、速度とトルクの組み合わせを4通りまで登録することができます。使用する材料により最適な条件を設定可能です。すべてのカボエンジンコントロールは、技工作業中でも見やすく、操作しやすいデジタルLEDディスプレイを搭載しています。

KコントロールTLC



膝タイプ



卓上タイプ



フットタイプ

技術仕様	
種類	膝タイプ、卓上タイプ、フットタイプ
ディスプレイ	4カラーディスプレイ
プログラム	4アジャスタブルプログラム (トルク/速度)
回転数	接続したハンドピースに合わせて自動的に速度調整が可能 安全速度制限スイッチ (30,000rpm) エルゴグリップでは、1,000~50,000rpm双方向へ回転変更



4カラープログラム

ワンタッチで、異なる4種類の回転数やトルクのプログラムを簡単に変更できます。

(※KコントロールTLC膝タイプ、卓上タイプのみ対応)