

KaVoクアトロケアプラス 買替キャンペーン



キャンペーン期間 ▶ 2024年 10月21日(月) ~ 2025年 1月20日(月)のご注文分まで

このたびKaVo クアトロケア/KaVo クアトロケアプラスの買い替えを対象とした「KaVo クアトロケアプラス買替キャンペーン」を**期間限定の特別価格**にてご提供いたします。

KaVo クアトロケアはすでに販売終了して10年以上経過しており、経年劣化により修理頻度が高くなったり、パーツ供給が今後できなくなるおそれがあります。KaVo クアトロケアプラスに買い替えていただくことで、経年劣化による修理代を抑え、より経済的に適切なメンテナンスを行っていただくことができます。

ぜひこの機会に買い替えをご検討ください。

※今回買い替えていただいたクアトロケア/クアトロケアプラスは、クアトロケアプラスご購入後の修理対応は終了とさせていただきます。何卒ご了承ください。

○ 手では除去しづらい 7ヶ所の汚れを強力オイル洗浄

構造上汚れが付着しやすく、手では洗浄できない汚れを、強力な洗浄力で除去します。

○ わずか2分で 強力・確実なオイル洗浄

短時間で効果的に汚れを落とせるのは、オイルがインスツルメント内部で泡状となり、高圧エアですみずみに行き渡るからです。

1度に4本同時のオイル洗浄・注油がたった2分で行うことができます。



スプレーオイルがハンドピース内で30倍に拡張し、汚れを吹き飛ばします。



○ シンプルで簡単な操作

○ 省スペースで安全設計

小規模な診療室でも簡単設置

○ 適切なメンテナンスで ランニングコストを低減

製品寿命はその製品自体の品質だけではなく、メンテナンスの習慣によって決まります。定期的に洗浄と注油を行うことで、インスツルメントが故障を起こしにくくなり、修理・買い替えなどのランニングコストを軽減でき、経済的です。



オイル不足でローターが黒く焦げ付きチャック部分も破損

KaVo クアトロケアプラス

● 外形寸法

幅	35cm
奥行き	28cm
高さ	38cm

● 付属品

イントラマチックケアカプリング(コントラ用) 3本
マルチフレックスケアカプリング(タービン用) 1本
クアトロケアスプレープラス(1本)

● 仕様

重量	10kg
電源	AC 100 - 240 V
電圧	50 - 60 Hz
消費電力	約24W
使用エア-圧力	4 - 6 bar
消費エア-流量	約50 NI/分



短時間で作業効率を高める KaVoメンテナンス・滅菌システム



感染リスクの少ない診療環境がわずか20分

「患者さまを診察している間に洗浄・滅菌が完了する」メンテナンス・滅菌サイクルづくりをKaVoはサポートします。

STOP!! 使いまわし

<p>Washing-Time 外装部の洗浄</p> <p>流水下で約1分間外装部を歯ブラシ等で洗浄します。60~70%のアルコール溶液に浸した柔らかい布で、外装部を拭き取ります。</p>	<p>QUATTRO-Time 内部オイル洗浄・注油</p> <p>内部のオイル洗浄及び注油が2分間で完了します。</p> <p>クアトロケアプラス 2124A</p>	<p>Steri-Time 滅菌</p> <p>滅菌パックに入れて約10分間で滅菌は終了します。 *滅菌パックモードで使用した場合</p>	<p>Ready-Time 保存</p> <p>インスツルメントは新たに安心して使える状態になりました。滅菌パックに入れた状態で次の診療まで保管します。</p>
---	---	--	---

※内部洗浄・消毒 (internal cleaning / internal disinfection) を行う場合は、ISO15883-1に準拠したMiele社の器具除染用消毒器 (ウォッシャー・ディスインフェクター) の使用を推奨しています。

より安心して
ご使用
いただくために

クアトロケアプラス小型機器延長保証

通常の製品保証(1年間)終了後により安心して機器をご使用いただけるよう、延長保証を2種類(プラチナ・プラチナプラス)をご用意しました。詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

オーダーシート ▶▶ FAX:03-6840-0906

貴医院名(必ずご記入ください)		ご住所	
		TEL.	
お取引ディーラー名		ご担当者名	受付番号

製品番号	製品名	標準販売価格(税別)	ご注文数
1.008.3805	クアトロケアプラス 2124A	302,000円	

買い替え製品(対象製品を○で囲ってシリアル番号をご記入ください。)

クアトロケア / クアトロケアプラス	(シリアルNo. _____)
--------------------	-----------------

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。



カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)

<https://www.kavo.jp>